

TESUNI NEEDLESS

NO MÁS AGUJAS!

TESUNI NEEDLESS es la oportunidad que la esteticista había esperado para aplicar la técnica de mesoterapia con toda seguridad!

Dígale adiós a las jeringas y agujas, aplique el producto para mesoterapia sin inyectar a su paciente y obtenga de el tratamiento los mejores resultados!

La Electroporación son ondas electromagnéticas hectométricas que generan en la epidermis poros y canales reversibles para permitir hacia el interior la entrada de sustancias cosméticas, incluso liposomadas! sin tener que inyectar.

Solo necesita aplicar 20 o 25 minutos el **TESUNI NEEDLESS** e irremediabilmente el producto de aplicación tópica estará en el estrato dérmico de la piel o a donde apunte su vector de aplicación.

FICHA TÉCNICA

Alimentación: 110 V / 60 Hz
Potencia máxima de entrada: 95 Watts
Cabezal aplicador corporal de 15 cm² y facial de 5 cm² intercambiables.
Tiempo máximo de aplicación 30 min.
Emisión continua y pulsada



PHOENIX EM
Ingeniería Biomédica

COMPAÑIA INDUSTRIAL PHOENIX ELECTROMEDICINA LTDA
Zona Industrial El Carvajal, Calle 31 Bis Sur No. 68N-10
PBX: (57 1) 710 2257 FAX: (57 1) 270 9859 CELS: 310 230 5250
www.phoenixem-co.com - comercial@phoenixem-co.com - BOGOTÁ, COLOMBIA



INDICACIONES

Utilice el **TESUNI NEEDLESS** para introducir a la dermis los productos de mesoterapia en estado viscoso, líquido e inclusive cremoso como los productos liposomados.

Las indicaciones ya no son del equipo sino de los productos que irá penetrar, por que el **TESUNI NEEDLESS** no tiene efectos secundarios, ni siquiera calor sentirá su paciente.

CUIDADOS GENERALES

La electroporación es una técnica segura, de fácil y sencilla operación en dónde el paciente no siente ninguna molestia.

El entorno de operación del equipo debe ser limpio y los elementos de aplicación estar en perfecto estado de desinfección con glutaraldehído al 2% u otro desinfectante cuaternario.

Afiliado a:


Cámara de la Industria
Cosmética y de Aseo


ICONTEC
INTERNATIONAL