



LAMPARA MAGNIFICADORA 1006 – 1006A



¡BIENVENDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.

La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso, ya que es política del fabricante. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos: info@silverskin.com.co

FICHA TÉCNICA

Pesos y tamaños	Tamaño empaque (cm)	83,5 x 69,5 x 13,5
	Peso bruto (kg)	12,8
Características de trabajo	Tipo	SMD.LED 20pcs
	Dioptías	5 dioptías
	Flujo Luminoso	170/250/350/420 lúmenes
	Color temperatura	7000/8000 k
Características eléctricas	Diámetro de lente	14,5 cm
	Voltaje de entrada	100V ~ 120V
	Frecuencia	50 /60Hz
	Potencia	Nivel 1: 2,5W, 950 LUX Nivel 2: 3,5W, 1400 LUX Nivel 3: 5,0W, 1900 LUX Nivel 4: 7,0W, 2400 LUX

1006 – 1006A

Este es un instrumento para verificar los cambios de menor importancia en la superficie de la piel y monitorear su situación, ver los beneficios del tratamiento con ayuda de una buena alimentación. Esta identifica cuando la piel está suave, delicada y resistente.


Debido a su diseño y función de aumento especial, es perfecto para la realización de tatuajes en cualquier parte del cuerpo, tatuajes de labios, injerto de pestañas y otros tratamientos de belleza.

Está equipada con brazo articulado y base de 5 ruedas de máxima estabilidad. Se destaca por su diseño ergonómico con dos asas que permiten orientarla en la posición deseada. Se puede utilizar con el pedestal que es lo aconsejable. Si utiliza otro instrumento, debe ser igual en condiciones y función de seguridad al pedestal de origen. Su diseño es especial para evitar pellizcos en las manos del profesional que esté manipulándola. Emite suaves y cómodos rayos de luz, que no causa mareo al cliente.


Instrucciones para el usuario:

1. Conecte el cable de poder a un regulador de voltaje. No conecte de manera directa a la toma corriente.
2. Encienda el botón de encendido, levante la tapa protectora de polvo, apunte el lente de lupa a la zona del cuerpo que va a examinar.
3. Ajuste la distancia entre la lámpara y la piel 10 o 20 cm para tener una buena distancia de visualización. Ajuste el brillo apropiadamente para lograr mayor claridad. Hay 4 niveles para el ajuste de aumento o disminución de luminiscencia de acuerdo con su necesidad.
4. Examine la piel e inicie su tratamiento de belleza, la luminiscencia puede ser ajustada durante el protocolo.

|| Aumentar el brillo Reducir el brillo ||

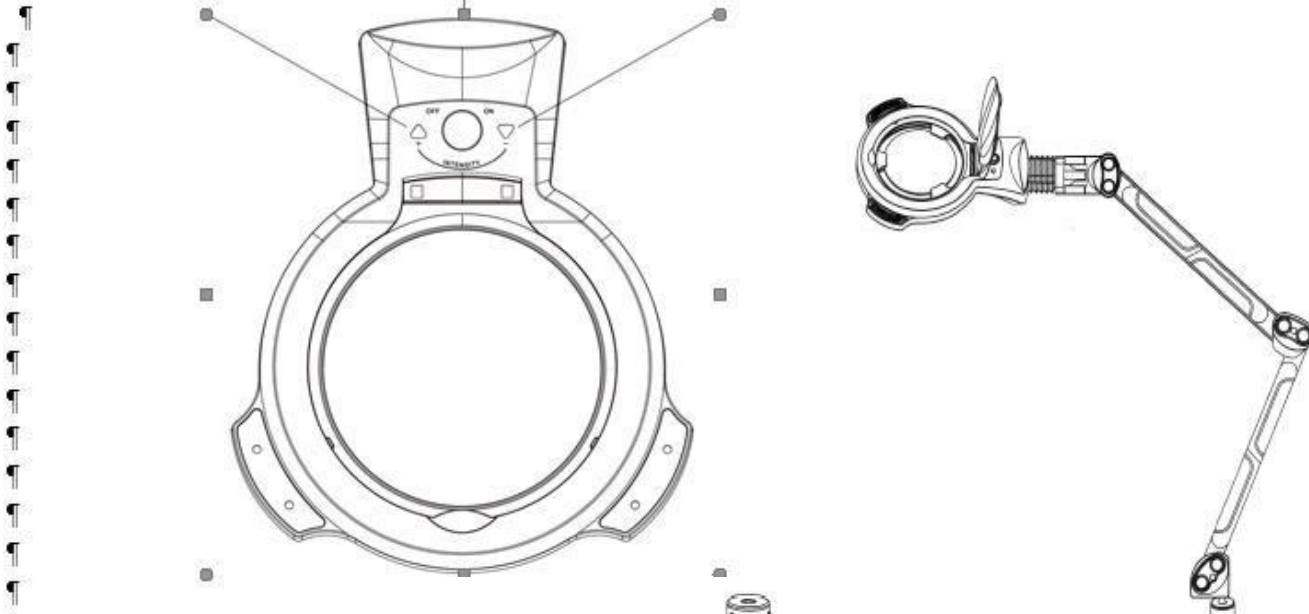

Secuencia de armado.

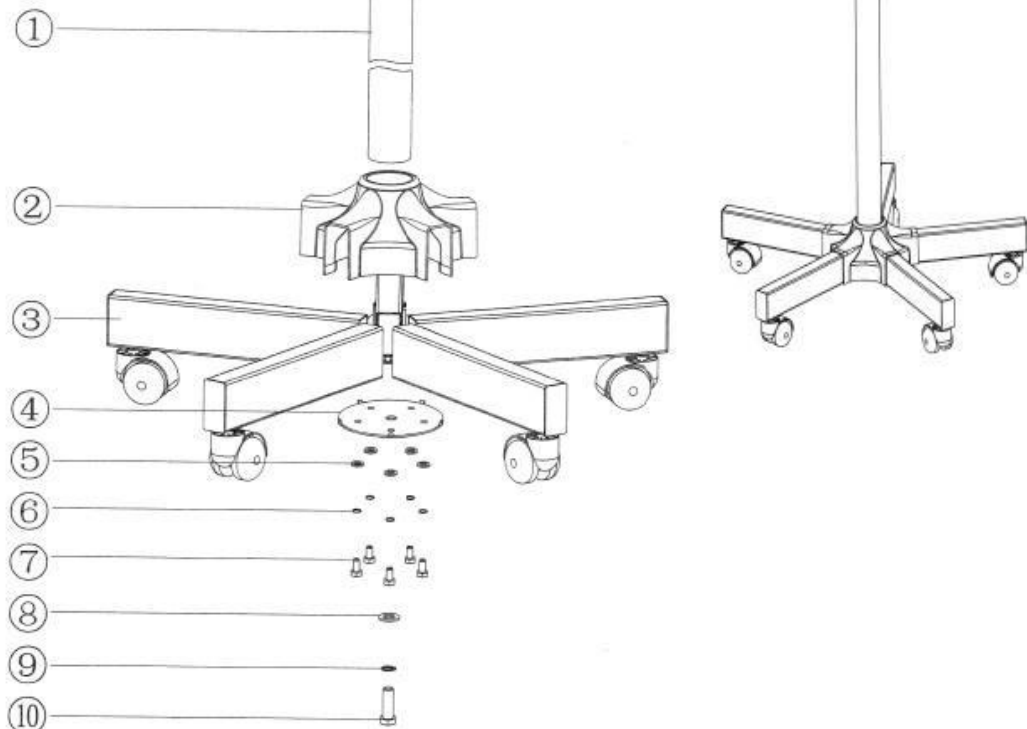



PRECAUCIONES

- Asegúrese de que sus manos estén secas al manipular la lámpara y cuando pulse el "POWER"
- Asegúrese de que el equipo, la base, la fuente de alimentación u otro accesorio no estén rotos ni quebrados. En caso tal pida un mantenimiento o el cambio de la pieza averiada con su proveedor.
- Es peligroso mover todo el equipo cuando esté encendido.
- Asegúrese que la toma corriente está en buenas condiciones y conecte a un regulador de voltaje. Si no lo utiliza no lo mantenga conectado.
- No instale el producto en una zona húmeda, intemperies o expuesta al calor extremo y/o luz solar directa.
- No utilice el equipo por un largo periodo de tiempo sin descansos, respete los tiempos de trabajo y al terminar desconecte de la fuente de poder.
- No dejar caer, no golpear. Si va a transportar mantenga las condiciones del empaque original.
- Utilice protección de ojos (gafas o toallas) en el paciente antes de iniciar el protocolo

MANTENIMIENTO: Apague el equipo y desconecte el cable de poder. Limpie con un paño suave, no utilice agua de manera directa en la estructura. Para la limpieza del lente utilice un producto y paño especial para esto, un paño común o papel, podría dañarlo. Evite el contacto de agua o de cualquier otro líquido con cualquier interruptor o el panel de control.

ADVERTENCIA

FUENTE DE LUZ: (IEC 60417-6042): La fuente de luz sólo debe ser remplazada por un agente de servicio calificado.

- En ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos del equipo. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente calificado y avalado por su proveedor.
- No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de aguas, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.
- Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja tensión 2006/95/EC
2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2004/108/EC

RECICLAJE



Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

Garantía de 12 meses por defectos de fábrica. No cubre la garantía si el equipo tiene golpes evidentes, si se determina que sufrió una descarga eléctrica, si se le ha derramado líquido, si se ha abierto, o si se han pasado por alto una u otras las precauciones y advertencias de este manual, los accesorios del equipo no son cubiertos por la garantía. Para solicitar un cambio por garantía, es indispensable que mantenga el empaque original sin averías significativas, la etiqueta de seguridad con datos del importador deberá estar intacta.