



MANUAL DE USUARIO



¡BIENVENDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo, uso e instalación incorrecta.

La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso, ya que es política del fabricante. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos: info@silverskin.com.co

VAPOR CON PEDESTAL SOLO CALOR B-002

Equipo vaporizador con ozono de diseño sencillo y funcional. Equipado con cabezal giratorio. Altura regulable y base estable con ruedas para facilitar el desplazamiento.

AVISO IMPORTANTE: Antes de usar el vaporizador con un cliente, es muy importante realizar dos ciclos completos. ¡No los haga con un paciente!

Es recomendable lavar el nuevo recipiente, solamente con agua, antes del primer uso.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES DE USO:

- Asegúrese de que sus manos estén secas para la manipulación del equipo y cuando pulse el botón de encendido.
- De no conocer el funcionamiento del equipo, asegúrese de asesorarse con un profesional.
- Asegúrese que el tomacorriente está en buenas condiciones y de conectar el equipo con un estabilizador de voltaje.
- No use ninguna sustancia que no sea agua destilada.
- Utilice con precaución los aceites esenciales o hierbas para no contaminar el agua utilizada en el vaporizador.
- NUNCA utilice el equipo vaporizador en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados.
- NUNCA utilice el vaporizador en el exterior.
- NUNCA intente abrir la carcasa/caja protectora del vaporizador usted mismo.

- Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.
- No deje que el vaporizador funcione sin agua, si lo hiciera se anularía la garantía.
- Cuando utilice la máquina, no apunte el atomizador a la cara del cliente hasta que el vapor salga en una capa fina y uniforme.
- El vapor primero debe rociar la mandíbula del cliente y luego el resto de la cara.

FICHA TÉCNICA:

Ajuste	Límite de altura superior (cm)	110
	Límite de altura inferior (cm)	93
	Rotación del brazo	-
	Rotación del Cabezal	360°
	Extensión del brazo (cm)	-
Pesos y tamaños	Tamaño embalaje en (cm)	80x30x27
	Peso bruto (Kg)	6,3
Depósito de Agua	Materia	Metacrilato
	Capacidad	0,7 L
Características de funcionamiento	Tiempo de Pre calentamiento	6 min Aprox
Características eléctricas	Voltaje nominal	110V-220V
	Frecuencia	50Hz-60Hz
	Potencia nominal	700 W
Esenciero		No
Ozono		Si
Depósito de hierbas		No

RECICLAJE:



Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

ACCESORIOS Y COMPONENTES:

Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.

El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

N°	PRODUCTO	REF	CANTIDAD
1	BASE PARA 5 BRAZOS	-	1
2	BRAZO DE RUEDAS	-	5
3	POSTE	-	1
4	BARRA DESLIZANTE	-	1
5	ROSCA DE AJUSTES	-	1
6	PLACA DE PRESIÓN	-	1
7	ARANDELA	-	1
8	ARANDELA GROWER	-	1
9	TORNILLO	-	1
10	LLAVE	-	1
11	B-002	-	1
12	DEPÓSITO DE AGUA	10052	1
13	TAPÓN	-	1
14	JUNTA DE SELLADO	10052-1	1

FUNCIONAMIENTO:

Este aparato estético convierte agua en **vapor de agua** y en **ozono**. La máquina dispone de un depósito de agua y una resistencia eléctrica para calentarla. El vapor sale de manera controlada por un difusor, que debe ser ubicado sobre la zona a tratar. Cuando se activa la generación de ozono, en el interior del aparato una lámpara ultravioleta convierte el O₂(Oxígeno) en O₃ (Ozono), que es expulsado a continuación por el difusor.

El vapor, que sale lentamente y sin goteos, genera una **sensación agradable y múltiples efectos positivos** sobre la piel.

EFFECTOS:

Los tratamientos a base de ozono purifican y oxigenan la piel, no solamente del rostro sino también del cuerpo. El vapor tiene los siguientes beneficios:

- Abre los poros, facilitando la salida de espinillas, puntos negros, restos de maquillaje e impurezas.
- Purifica e hidrata la epidermis.
- Relaja los músculos, sensación de bienestar.
- Estimula el funcionamiento glandular, ayudando a la eliminación de toxinas.
- Favorece la circulación sanguínea y despeja los conductos nasales. Además, el vapor de ozono tiene dos efectos importantes:
 - ✓ aumenta la oxigenación de los tejidos y a nivel celular
 - ✓ efecto bactericida y germicida; ayuda a eliminar bacterias y purificar la piel en profundidad.

MODO DE EMPLEO

RELLENO DE AGUA:

1. Retire la cubierta de plástico y el tapón de goma en la parte superior del vaporizador
2. Llene el vaso con agua a través del agujero.

Nota: El nivel del agua tiene que estar entre los niveles "MAX" y "MIN" marcados en el vaso.

3. Recoloque el tapón y la cubierta.

INICIO DE TRATAMIENTO

1. Encienda el botón "POWER": El calentador comienza a funcionar. Después de aproximadamente 6 minutos, el vapor saldrá del atomizador.
2. A partir de este momento, puede encender la tecla "OZONE": La lámpara de ozono se enciende y comienza a funcionar.
3. Cada vez que el nivel del agua alcance el límite inferior, apague el botón "POWER". Espere que el equipo se enfríe y retire la tapa cuando el vapor deje de salir, añada un poco de agua destilada y vuelva a reanudar la operación.

SUGERENCIA DE TRATAMIENTO

TIPO DE PIEL	DIST.	TIEMPO
Piel grasa, mala circulación sanguínea	25cm	15 min
Piel normal	25cm	10 min
Piel sensible	30cm	5 min
Expansión de los vasos capilares	30cm	5 min

ADVERTENCIA

Si la unidad emite vapor de agua mezclado con agua caliente:

1. Limpie el vaso de agua con vinagre y enjuáguelo con agua limpia.
2. Llene el recipiente con agua limpia y añada de 8 a 10 gotas de vinagre. Haga funcionar el vaporizador durante el tiempo de un ciclo (no lo use con un paciente!).
3. Cuando termine el tiempo de funcionamiento, apague el vaporizador y enjuague el vaso con agua limpia.
4. Haga funcionar el vaporizador durante 2 ciclos enteros con agua limpia.

MANTENIMIENTO

Es recomendable limpiar el vaporizador al menos una vez a la semana y también descalcificar el calentador de agua. Por favor, siga los siguientes pasos:

1. Una vez que el vaporizador esté frío, retire el vaso de agua.
2. Llene el recipiente con la adecuada solución de descalcificación / agua y déjela reposar durante la noche.
3. Elimine el agua y enjuague con agua limpia para eliminar cualquier residuo del producto de descalcificación.
4. Rellene con agua y ponga marcha el vaporizador durante al menos un ciclo con el fin de eliminar cualquier residuo que quede en el vaporizador.
5. Retire el vaso y enjuáguelo como antes.
6. Rellene con agua y ya estará listo para su uso.

Nota: Si no se eliminan todos los residuos de descalcificación puede hacer que el vaporizador los 'escupa'. Si esto ocurre, simplemente repita el procedimiento de enjuague y llenado hasta que el problema se haya resuelto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

- Este equipo está diseñado para uso en estéticas, spa, consultorios de fisioterapia etc. Y por personal capacitado para ello.
- Utilice solamente el tipo de corriente indicado en las instrucciones del equipo
- Utilice solamente el cable de alimentación que acompaña el equipo, el uso de otro cable puede producir descargas eléctricas, incendios.
- No utilice el cable con ningún otro equipo.
- Siempre use el equipo con regulador de voltaje para evitar su daño.
- Desconecte el equipo del tomacorriente cuando no se encuentre en uso y si usted no lo va a usar en un largo periodo de tiempo
- No conecte el equipo a un enchufe donde esté conectado otros equipos, que se apaguen y enciendan regularmente, o a un tomacorriente que este controlado por un interruptor o temporizador automático
- Si utiliza una extensión con este equipo, asegúrese que el cable aguante el doble de la corriente del equipo, y si le conecta otros aparatos sume las corrientes nominales de cada uno sea el doble de estas.
- Procure no estropear el cable de alimentación y los cables que vienen con los accesorios del equipo.
- Evite colocarlos en lugares donde halla variación rápida de calor y humedad, en donde se pueda golpear por vibraciones o donde halla polvo.
- No coloque o almacene el equipo cerca de fuentes de calor, en un entorno polvoriento o húmedo, expuesta a la luz solar directa o al aire libre.
- Coloque el equipo en una superficie plana, si este queda inclinado no funcionara correctamente.
- No derrame líquidos sobre el producto y no lo manipule con las manos mojadas
- Antes de limpiar el equipo desconéctela del enchufe
- No le realice mantenimiento, solicite un técnico de servicio
- El equipo no debe ser usado por niños o personas que estén capacitadas en el manejo de este.

GARANTIA LIMITADA:

Este equipo tiene garantía contra defectos de fabricación y el mal funcionamiento de los materiales utilizados para la fabricación del mismo y cuando las fallas ocurran bajo las condiciones de uso y manejo descritas en el manual. La garantía cubre el periodo de: 12 meses a partir de la fecha de entrega del equipo al comprador. No cubre accesorios. Para cambio total, conserve los empaques originales.

La garantía no será válida en los siguientes casos:

1. Cuando el número de serie del equipo haya sido alterado, retirado o no registre en nuestra base de datos.
2. Cuando del equipo haya sido retirada la etiqueta de seguridad, y haya sido desarmado, sufrido modificaciones externas o internas, o reparaciones no autorizadas por IMC
3. Cuando se produzcan daños al equipo causados por desastres naturales o provocados
4. Cuando se produzcan derrames de sustancias sobre el equipo.
5. Cuando las piezas exteriores de los equipos hayan sido ralladas, maltratadas o estén rotas.

La garantía no incluye accesorios (cabezales, cables de poder, adaptadores, electrodos, cauchos, ruedas, baterías, espátulas, bombillos)

Servicio por garantía

Instrumentos Médicos De Colombia ofrece el servicio por garantía, debe comunicarse con el asesor de ventas, el cual le dará las indicaciones para hacer llegar el equipo a nuestras instalaciones.