

# MANUAL DE INSTRUCCIONES F-801C


## ¡BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo, el no hacerlo puede invalidar su garantía. Si necesita orientación, pídala a un profesional capacitado o comuníquese con su distribuidor para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No se acepta ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño de equipo o accesorios, sin previo aviso.


## CONTENIDO DEL PAQUÉTE F-801C

\*El aspecto del producto puede diferir de la imagen.




Cabezal  
ocular

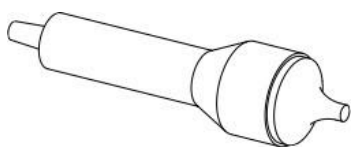

Cabezal facial


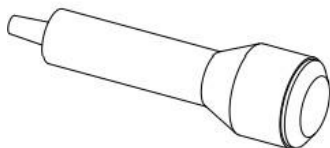


Cabezal  
Corporal

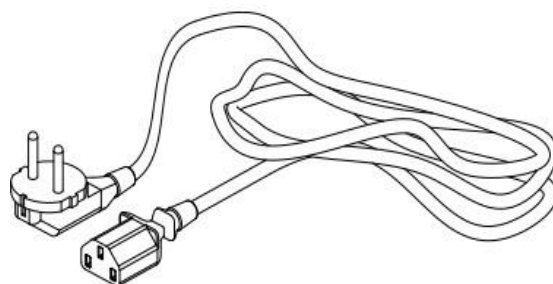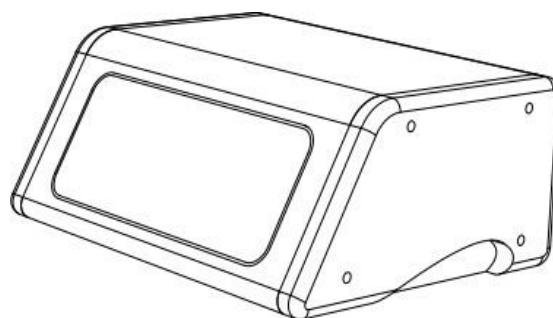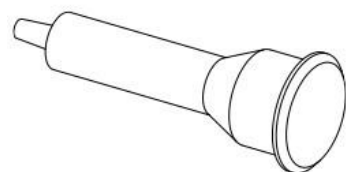

N°	PRODUCTO	REF	CANTIDAD
1	CABEZAL OCULAR	10034	1
2	CABEZAL FACIAL	10035	1
3	CABEZAL CORPORAL	10036	1
4	MÓDULO DE CONTROL	F-801C	1
5	CABLE DE PODER	-	1

## PANEL FRONTAL/PANEL TRASERO

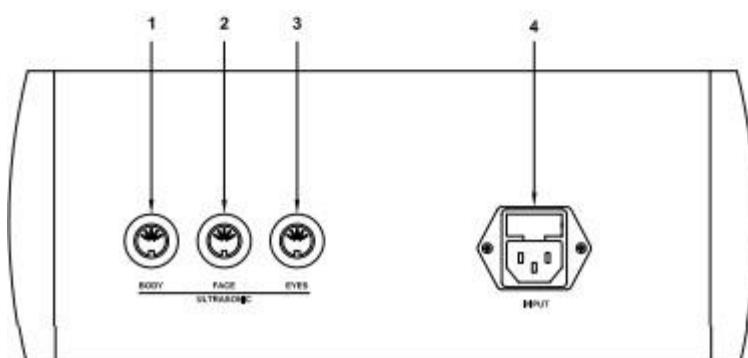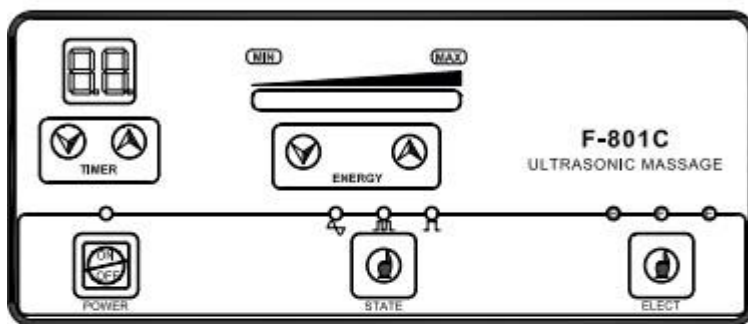

### CONECTORES

1. Cabezal corporal
2. Cabezal facial
3. Cabezal ocular
4. Cable de alimentación eléctrica

### ADVERTENCIA



- Nunca, bajo ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si es necesaria una revisión, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente calificado.
- No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas húmedas, baños, etc. Siempre utilice en una cabina o habitación que cumpla los requisitos de las normas básicas. Esto ayuda a prevenir daños en los componentes eléctricos del equipo.
- Nunca utilice el equipo al aire libre, No es apto para el uso en exteriores.

# MANUAL DE INSTRUCCIONES F-801C

- Si el cable que alimenta a la electricidad se rompe o está roto, solicite a un distribuidor autorizado que le suministre otro y lo cambie por uno del mismo fabricante para evitar riesgos.
- Nunca deje los cabezales de ultrasonidos encendidas sin gel y sin vigilancia, pues podrían recalentarse y causar daños internos acortando su vida útil.
- No trate de separar el generador de acero inoxidable de su funda de goma (mango del cabezal), cualquier intento de hacerlo podría causar daños irreparables en el generador y todo el cabezal.
- En ninguna circunstancia retire la etiqueta naranja de seguridad, ya que de esta depende la validez de garantía.


## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas: 1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2014/35/EU. 2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU

Este producto cuenta con registro sanitario INVIMA vigente No. 2015EBC-0012953 para Colombia.

Contamos con registro (CCAA) otorgado por el INVIMA.

## RECICLAJE

Cuando aparezca este símbolo  en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, significa que no debe tratarse un como residuos doméstico convencional en Colombia. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con la ley local o comuníquese con su distribuidor sobre información para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a una segura disposición final preservando el medio ambiente en pos de una mejora de los estándares para el tratamiento de residuos eléctricos.

## INSTRUCCIONES DE USO

### ANTES DEL TRATAMIENTO

1. Limpie/tonifique el área de tratamiento. con los productos prescritos para cada tipo de piel.
2. Termine de retirar cualquier producto sobrante con ayuda de la aplicación de vapor facial durante 10 minutos.
3. Limpie el área a tratar de nuevo para eliminar cualquier suciedad o residuo final de la piel así, evita que las ondas de ultrasonido lo devuelvan de nuevo a la dermis.

## MANUAL DE INSTRUCCIONES F-801C

4. Tonifique toda la cara (o el área a tratar) con suavidad utilizando un astringente o agua micelar adecuado al tipo de piel
5. Después de retirar el astringente, termine la limpieza fondo para una protección óptima.
6. Aplicar abundante gel conductor en el cabezal, teniendo en cuenta toda el área a tratar-

### INICIO DEL TRATAMIENTO

1. Conecte los cables de alimentación en el panel trasero, indicado en el esquema como "POWER LINE INPUT".
2. Conecte los accesorios correctamente en el panel delantero/trasero como se indica en el esquema.
3. Ajuste la intensidad de acuerdo con los bloques de la pantalla LCD, mediante el botón "ENERGY". En general debe comenzar en los bloques 3-4 y luego aumentar según sea necesario.
4. Seleccione el estado de onda deseado encendiendo "STATE". Hay 3 tipos de estado de onda: onda continua, onda intermitente, y onda combinada.
5. Sujete firmemente el cabezal del ultrasonido y pulse el botón "POWER" para empezar.
6. Masajee el área de tratamiento. donde se ha aplicado el suficiente gel conductor mediante pequeños movimientos circulares para cubrir toda el área de tratamiento. El tiempo de tratamiento variará dependiendo del tamaño del área a tratar. Un estándar (completo) para la zona facial debería durar 10-15 minutos de masaje repetitivo.
7. Tras completar el tratamiento, apague el equipo, desconecte de la corriente y devuelva el cabezal a su posición.

### NOTAS

- Asegúrese siempre de que aplica suficiente gel conductor para por lo menos 15 minutos de tratamiento.
- Generalmente las potencias más bajas se utilizan para tratamientos faciales y las más altas para los tratamientos corporales.
  - Si el área de tratamiento es pequeña o sensible, utilice la sonda ocular y asegurarse de que la intensidad se limite a los bloques de 5-7 (en la "ENERGY" de pantalla LCD). El tiempo de tratamiento también se puede reducir a 8-10 minutos.
- Un paquete de tratamiento estándar dura alrededor de 10 sesiones en total, con un período mínimo de descanso de un día entre sesiones. Si se llevan a cabo otros tratamientos faciales en la misma zona, debe esperarse un período mínimo de descanso de 7 días entre los tratamientos.

## MANUAL DE INSTRUCCIONES F-801C

- No usar nunca sobre la piel seca.
- No usar en la zona del vientre de las mujeres embarazadas.
- No usar en personas con marcapasos (o cualquier equipo eléctrico o rítmico de regulación del corazón).
- No usar en personas con afecciones cardíacas.
- Utilice siempre los electrodos ultrasónicos con la suficiente crema hidratante o serum en la piel. • El tratamiento con ultrasonidos es adecuado para todo tipo de piel. El tiempo de masaje y la configuración del equipo puede ajustarse para cada tipo de piel. Para pieles sensibles, reduzca el tiempo de tratamiento a 3-5 minutos y asegúrese de que la potencia está al nivel más bajo para empezar.

Compruebe lo siguiente si la unidad de trabajo se enciende, pero los cabezales no emiten.

- Ponga una gota de agua en él cabezal.
- Encienda el equipo y aumente lentamente la potencia.
- Si el agua comienza a moverse y se evapora, el equipo y el cabezal están funcionando correctamente. Si no es así, La unidad y los cabezales no están funcionando correctamente.
- Asegúrese de que se ha aplicado suficiente gel conductor en el área de tratamiento.

### **MANTENIMIENTO**

- Los cabezales de ultrasonido deben limpiarse con agua limpia (no caliente) y un paño limpio y suave, y luego ser esterilizadas químicamente con un líquido de esterilización apropiado. Seque cuidadosamente el cabezal después de la esterilización y almacénela de forma segura en su soporte. Siempre esterilice los cabezales de nuevo antes de su uso.
- ¡Nunca sumerja el cabezal en ningún líquido

# MANUAL DE INSTRUCCIONES F-801C

## FICHA TÉCNICA

Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	39x36x18,5
	Peso bruto (kg)	4,8
	Tamaño consola (cm)	31x17/24x13
Características de trabajo	Potencia de trabajo	0 - 1,5 W/cm <sup>2</sup>
	Frecuencia de trabajo	1 MHz
	Tiempo de trabajo preestablecido	15 min
	Tiempo de trabajo máximo	30 min
Características eléctricas	Voltaje nominal	120V ~ 220V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nominal	20 W